



Fauteuil LIBERTY e

(Fauteuil à pousser à inclinaison électrique)



Le LIBERTY e est un Dispositif Médical à usage intérieur exclusif.

Il est agréé CERAH sous le code 4263950 VHP poussette ou fauteuil dossier inclinable.

Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 4 boutons.

Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression (possibilités de remise en état à coûts réduits).

Le fauteuil LIBERTY e est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant. Ce fauteuil nécessite impérativement la vigilance d'un accompagnant.

Ce fauteuil est un Dispositif Médical destiné aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elle-même.

Options :

Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin visco Classe II



Caractéristiques :

- **Hygiène optimale** : modules de couette **remplaçables, amovibles et lavables** en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Coloris** : 3 types de revêtements
PVC/Polyuréthane : Cacao, Ebène, Citron et Framboise - **Velours** : Choco Edition et Black Edition - **Tissu** : Gris chiné.
Revêtement PVC/Polyuréthane correspondant aux normes **Non Feu M2**.
- **5 Largeurs d'assise** : 30 cm, 36 cm, 42 cm, 48 cm et 54 cm.
- **Hauteur sol/siège** : 45 cm
- **Largeur hors tout du fauteuil** : largeur d'assise + 25 cm
- **4 Options disponibles** :
Tablette latérale- Cale tronc ajustable (droit/gauche) – Appareil de soutien partiel de la tête – Coussin Classe II

- **Poids maximum utilisateur** : 130 kilos
- Livré **monté** franco à l'unité toutes destinations France métropolitaine.
- **Fabrication française**
- Poids du fauteuil : environ 35 kg

Télécommande :

Télécommande verrouillable

Appuyer 5 secondes sur les deux boutons

(Blanc et Vert) – La télécommande est verrouillée

Appuyer à nouveau 5 secondes sur les deux boutons (Blanc et Vert) – La télécommande est déverrouillée

Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.

Bouton BLANC : Avant

Bouton VERT : Arrière

Le **bouton BLEU** permet d'actionner le système DETENTE programmé pour modifier automatiquement l'inclinaison de votre fauteuil, permettant ainsi l'apaisement des tensions et les risques de compressions prolongées (douces oscillations – programme de 35 mn)

Le **bouton JAUNE** active la fonction MASSAGE par vibrations du coussin lombaire



Aide à l'entretien :

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôlez et nettoyez les roues. Remplacez les roues si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôlez les freins.
- Contrôlez le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyez-le. Remplacez le revêtement si nécessaire.

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur assise	Hauteur hors-tous	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
300 mm 360 mm 420 mm 480 mm 540 mm	480 mm	Largeur d'assise + 250 mm	480 mm	1320 mm	38 kg	130 kg
Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15mm / 1.5 kg						