


## FICHE TECHNIQUE

### SIDESTREAM® Mini- nébuliseur haute performance

SANS LATEX

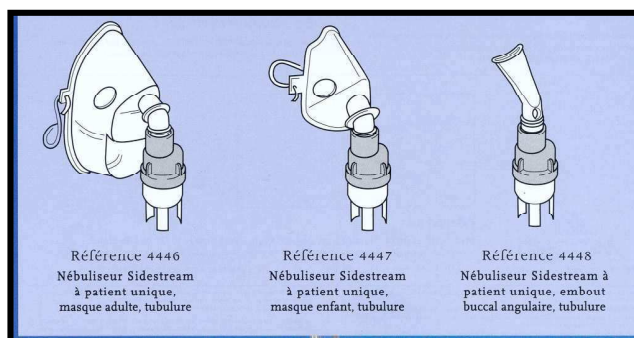

#### Références

- 4445SU :** Nébuliseur Sidestream (cuve seule)
- 4446SU :** Nébuliseur Sidestream avec masque adulte et tubulure (cf. illustration)
- 4447SU :** Nébuliseur Sidestream avec masque enfant et tubulure (cf. illustration)
- 4448SU :** Nébuliseur Sidestream avec embout buccal angulaire et tubulure (cf. illustration)
- 4452SU :** Nébuliseur Sidestream avec embout buccal angulaire et tubulure (par carton de 75)

#### Descriptif

**Sidestream®** est un mini nébuliseur à patient unique destiné à l'administration de solutions médicamenteuses par voies aériennes sous forme d'aérosol.

Disponible seul ou dans plusieurs configurations : avec masque adulte ou enfant, avec embout buccal, avec ou sans tubulure.

La conception unique et innovante de la cuve et une double cheminée intérieure qui génère un effet « turbo » font de Sidestream un nébuliseur **haute performance** avec une **nébulisation express** (2,5 ml en moins de 7 min.), un dépôt élevé de médicaments (80% de particules < 5 microns), et un faible volume résiduel (0,5 ml).

#### Caractéristiques

|                                     |           |  |        |
|-------------------------------------|-----------|--|--------|
| <b>Cuve :</b>                       | 2 à 12ml  | <b>Débit :</b>                               | 6 L/mn |
| <b>Débit total venturi ouvert :</b> | 16 L/mn   | <b>% de concentration en O<sup>2</sup> :</b> | 50     |
| <b>Sortie :</b>                     | 0.37 g/mn | <b>% de particules &lt; 5 µm :</b>           | 80     |
| <b>Débit respirable :</b>           | 0.3 g/mn  | <b>Temps d'administration pour 2,5 mL :</b>  | 6,7 mn |
| <b>MMAD:</b>                        | 3 µm      | <b>Volume minimal nébulisable :</b>          | 0.75ml |

**Volume maximum nébulisable : 9ml**

**Granulométries en fonction des médicaments nébulisés et du débit:**

| Médicaments                 | 4 l/min | 6 l/min     | 8 l/min |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|
| LOMUDAL                     | 5.08    | <b>3.95</b> | 3.40    |
| PULMICORT                   | 5.58    | <b>4.18</b> | 3.48    |
| AROMASOL                    | 4.07    | <b>3.04</b> | 2.44    |
| ATROVENT                    | 5.31    | <b>3.67</b> | 3.11    |
| GOMENOL                     | 5.49    | <b>4.06</b> | 3.35    |
| MUCOMYST                    | 3.55    | <b>2.99</b> | 2.50    |
| GENTALLINE                  | 4.93    | <b>3.88</b> | 3.14    |
| COLIMYCINE                  | 4.72    | <b>3.75</b> | 3.07    |
| VENTOLINE                   | 4.47    | <b>3.39</b> | 2.92    |
| XYLOCAINE                   | 4.52    | <b>3.62</b> | 2.95    |
| TOBRAMYCINE SULFATE (TOBI®) | 4.62    | <b>3.56</b> | 2.97    |

Taille des particules MMAD ( $\mu\text{m}$ ) produit à 4, 6 et 8 litres par minute de débit. (MALVERN Mastersizer: )

**Composition des matériaux**

**4445SU / 4448SU** : Polypropylène - **4446SU / 4447SU** : Polypropylène et PVC

**Stérilisation et stockage**

**Produit non stérile, à patient unique** (voir instructions pour le nettoyage).

A conserver dans un lieu sec, propre et convenablement aéré, à l'abri de la poussière et de toutes sources directes ou indirectes de lumière.

**Conditionnement**

**UCD** (Unité de Commande) : **50** (sauf pour réf 4452SU : 75)

**CDT** (Multiple de l'UCD) : Nous consulter

**QML** (Quantité Minimale de Livraison) : **50** (sauf pour réf 4452SU : 75)

**Précautions d'emploi**

Se conformer à la notice d'utilisation

**Distributeur:** Teleflex Medical SAS 31460 Le Faget - France

**Fabricant :** Respironics UK

**Classe IIa – SGS CE0120**

**MARQUAGE CE** selon Annexe II de la Directive 93/42/CEE