

**CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE
DE DÉCHARGE TOTALE
DE L'AVANT-PIED
«BAROUK» (CHUT)***



DESCRIPTION :

- Chaussure post-opératoire de décharge dégageant l'avant pied de tout appui.
- Disponible en deux versions : simple et prolongé.
- **Le modèle simple est constitué par :**
 - Une tige en toile, résistante et renforcée au talon pour assurer le maintien de l'arrière-pied ;
 - un système de fermeture par trois brides auto-agrippantes.
 - un talon composé :
 - d'un matériau antichoc et compressible
 - d'un coin amortisseur antérieur
 - l'ensemble axé en talus de 10°.
- **Le modèle prolongé présente :**
 - Une avancée de la semelle et de la tige pour protéger l'avant pied et éliminer le phénomène de la cassure médio-tarsienne, tout en conservant la décharge de l'avant-pied.
 - Les dimensions et les matériaux de la palette antérieure permettent d'assurer un déroulement normal et correct du pas.
 - Un talon toujours axé en talus de 10°, avec :
 - Une tige en maille
 - Une fermeture par deux bandes auto-agrippantes.

INDICATIONS EN UNI OU BI-PODAL :

- Tout le suivi post-opératoire dans la chirurgie de l'avant-pied (chirurgie correctrice ou réparatrice).
- Tout état inflammatoire, infectieux, douloureux, œdémateux, interdisant temporairement tout appui sur l'avant-pied tels que maux performants plantaires, ulcérations au niveau de l'avant-pied, syndrome algo-neuro-dystrophonique post-traumatique.

CONTRE INDICATIONS :

- Suites chirurgicales de l'arrière et du médio-pied.
- Manifestations pathologiques douloureuses de l'arrière-pied notamment au niveau du calcaneum. Bursites et tendinites péri et rétro-calcanéennes.

**CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE DE DÉCHARGE
TOTALE DE L'AVANT-PIED AVEC
PROLONGEMENT ET RECOUVREMENT
«MAYZAUD» MODÈLE PROLONGÉ (CHUT)***



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Cette chaussure ne doit pas être portée pieds nus et ne doit pas entrer en contact avec la peau lésée. Elle doit être mise en place sur des pieds revêtus d'une protection (chaussette, pansement, gaze). Toute lésion doit être protégée par un pansement. Toutefois, en cas de souillure par des déjections, il est recommandé de changer la chaussure.
- Elle est lavable à la main à 30°.
- Cette chaussure est limitée à un usage thérapeutique. Elle ne doit pas être réutilisée pour un autre patient.
- Cet article ne peut être délivré que par des professionnels autorisés selon la réglementation en vigueur.
- A stocker à l'abri de l'humidité et du soleil.

PRESCRIPTION :

- **Modèle simple :** Chaussure thérapeutique de décharge totale de l'avant-pied à usage temporaire.

Tailles	Pointures	Réf. ACL
Taille 1	36 à 39	3401065591163
Taille 2	39,5 à 42,5	3401065591224
Taille 3	43 à 46	3401065591392

- **Modèle prolongé :** Chaussure thérapeutique de décharge de l'avant-pied avec semelle prolongée à usage temporaire.

Tailles	Pointures	Réf. ACL
Taille 1	36 à 38	3401074368589
Taille 2	39 à 42	3401074373491
Taille 3	43 à 46	3401074373552

Pour les deux modèles :

Code L.P.P.R. : 2183855

REMBOURSEMENT L.P.P.R. : 30,49 Euros TTC

