

MOTORISATIONS LÉGÈRES

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, MOBILITÉ

2018
NOUVELLE OFFRE DE
BATTERIES

MINOTOR²

POUSSEUR²


KANGOOROO²



LES COMMANDES

**AMOVIBLE,
S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS**

**S'INSTALLE EN 15
SECONDES**

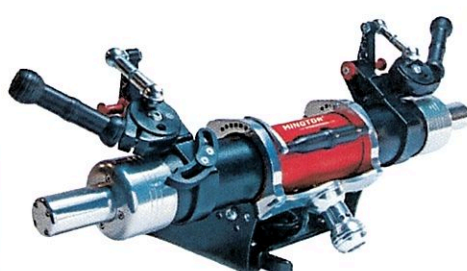

MINOTOR²



POUSSEUR²



KANGOOROO²

Comment ça marche?

Nous fixons des profils d'accrochage ultra légers sur les tubes de votre dossier.
Ils ne modifient ni l'encombrement ni le pliage de votre fauteuil.

Mise en place : 15 secondes

POIGNÉE SUPÉRIEURE



Poser la motorisation sur les crochets rouges du fauteuil




Glisser la batterie sur la motorisation la connexion est automatique



Mettre en place la commande correspondante sur la glissière installée sur votre fauteuil


Le fonctionnement

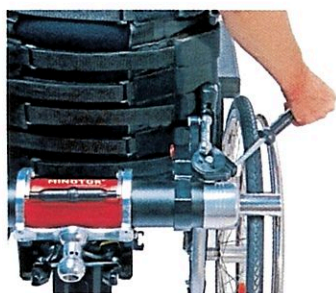

2 moteurs entraînent directement les roues. Il est possible de débrayer et de rouler librement



L'équilibre initial du fauteuil est conservé, une roulette anti-bascule amovible élimine tout risque

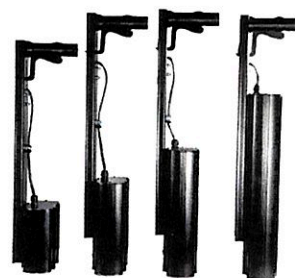

Les batteries sont installées sur un support appelé rack. Elles existent en plusieurs capacités. Il est possible d'avoir un rack de batterie supplémentaire

Les points forts

Facile d'utilisation : amovible, léger, rapide à installer et peu encombrant.

Mobilité / autonomie : s'empporte partout (voiture, avion), optimise tous vos déplacements, même en terrain difficile (pentes, herbe, gravier, etc...), vos déplacements deviennent une source de plaisir.

Qualité de vie : Elimine les efforts préjudiciables et sauvegarde les efforts bénéfiques.

Santé : évite les problèmes éventuels de tendinite ou de détérioration des articulations grâce à une modulation de l'effort.

Ergonomie : s'adapte à votre propre fauteuil, installation personnalisée en fonction de votre handicap et de votre morphologie.

Sécurité : l'équilibre initial du fauteuil est conservé, un anti-bascule amovible évite tout risque, la vitesse est réglable et programmable.

La motorisation joue le rôle de frein moteur dans les descentes.

Franchissement : 20% pour une personne de 100 kg.

Solidité : La motorisation légère diminue les contraintes sur le fauteuil, le renforce et augmente sa longévité.

Réadaptable : Toutes les motorisations se réinstallent lors d'un changement de fauteuil.



MINOTOR²



Poids de la Motorisation : 8.8 kg
Poids maxi de l'utilisateur : Environ 120 Kg
Vitesse max : 10 km/h programmable

Le Minotor² est destiné à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants. Le Minotor² vous offre la possibilité de motoriser très facilement en quelques secondes votre fauteuil roulant.

Débrayez la motorisation en un mouvement et retrouvez ainsi l'usage classique du fauteuil manuel.

Faites l'expérience d'une **mobilité augmentée** grâce à une motorisation robuste et performante.

Le Minotor² garde intact toutes les capacités du fauteuil manuel mais prolonge de manière radicale les possibilités de déplacement.

Le MINOTOR² est reconnu conforme par le CERAH aux spécifications techniques du titre IV de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Très grande facilité de conduite

Mise en place facile et rapide

Boîtier Tierce personne



Les commandes



ou



mini MINOTOR²



Poids de la Motorisation : 7.4 kg
Vitesse max : 10 km/h programmable

Les enfants, champions de l'adaptation !

Le Minotor² s'adapte et devient mini Minotor².

Toujours aussi intuitif et simple d'utilisation, l'enfant aura accès à un environnement social plus riche, à de nouveaux territoires de découverte, à l'autonomie ...

Le mini Minotor² est **modulable** et s'adaptera aux divers fauteuils. (Croissance de l'enfant, changement de type de fauteuil).

Maniabilité et sécurité de conduite

Discret et efficace

Boîtier Tierce personne



Les commandes



ou



POUSSEUR²



Pour certains handicaps, l'action d'une tierce personne est nécessaire dans les déplacements. La motorisation **Pousseur²** agit comme un «auxiliaire musclé» qui annule les efforts de la tierce personne.

Extrêmement utile pour les fortes pentes et les passages d'obstacle, il assure par ailleurs une sécurité parfaite en descente grâce au frein moteur et un plus grand confort en éliminant les à-coups.

Freinage dans les descentes

Plaisir de promenade partagé

Compatible avec les fauteuils «confort»

Les poignées



Poids de la Motorisation : 8.8 kg
Poids maxi de l'utilisateur : Environ 120 Kg
Vitesse max : 10 km/h programmable

KANGOUROO²



Le **Kangouroo²** s'adresse aux utilisateurs désireux de conserver la conduite «classique» d'un fauteuil manuel (utilisation des mains courantes, passage en deux roues).

Par sa souplesse de fonctionnement et le réglage précis de la puissance des moteurs, il permet aussi un usage plus sportif y compris sur terrains difficiles.

Possibilité de faire du 2 roues pour franchir les obstacles

Effort partagé entre les bras et les moteurs

Le variateur



Poids de la Motorisation : 8.1 kg
Poids maxi de l'utilisateur : Environ 120 Kg
Vitesse max : 10 km/h programmable

À vous de choisir ...

Votre motorisation:


Modèle Standard



Coloris du sous-ensemble et du tube central : NOIR
Harmonie du noir et des colliers anodisés

ou

Modèle Premium

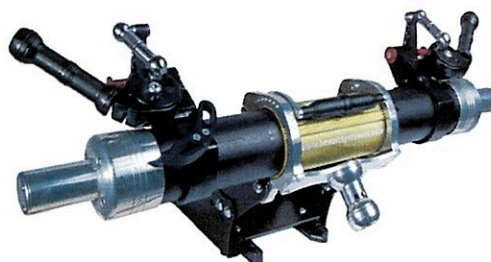

Plusieurs coloris disponibles :

VERT CITRON, ROSE, OR, GRIS, BLEU, VERT, NOIR et ROUGE

Finition brillante des coupelles et protèges galets et du sous ensemble central

Votre Batterie:

MODELE	Standard			
				
	Rack au Lithium 12 Ah 297Wh	Rack au Lithium 18 Ah 453Wh	Rack au Lithium 24 Ah 595Wh	Rack au Lithium 9 Ah 227Wh
POIDS	4 kg	5 kg	7 kg	3 kg
AUTONOMIE**	14 à 20 Km	20 à 30 Km	28 à 40 Km	9 à 11 Km
TEMPS DE CHARGE <small>Lorsque la batterie est vide</small>	5 h 30 min	7 h 15 min	10 h 50 min	3 h 40 min
DURÉE DE VIE	1000 cycles (environ 4 ans)	1000 cycles (environ 4 ans)	1000 cycles (environ 4 ans)	1000 cycles (environ 4 ans)
PAR DÉFAUT SUR COMPATIBILITÉ	MINOTOR ²	DOUBLE MINOTOR		POUSSEUR ²
	TOUTES LES MOTORISATIONS			

Les avantages des nouvelles batteries par rapport aux batteries d'ancienne génération :

Plus légère
Plus compacte
Poignée ergonomique

Indicateur de l'état de charge de batterie au niveau du manipulateur

* Les batteries 9 Ah et 12 Ah sont compatibles avec les règles IATA en vigueur au 01/01/2018 pour le transport aérien

** L'autonomie des batteries peut varier en fonction de la température, du poids de la personne et du type de terrain

Inclus

La commande au choix



Le chargeur



L'Anti-bascule



Coups de ♥

Le chargeur voiture



L'acti'tab



Plébiscité par les utilisateurs

Le concepteur explique



Le fauteuil roulant manuel moderne est un appareil simple, léger, solide et facile à transporter mais son mode de propulsion par les bras dont la force comparée à celle des jambes est modeste et pas très efficace. De plus, la façon dont s'exerce l'effort à bout de bras ne permet pas d'exploiter correctement la puissance des muscles

fait souffrir les articulations. La direction étant donnée par les roues arrière, les roues folles à l'avant entraînent vers les dévers le fauteuil dans la direction de la pente, ce qui augmente considérablement les efforts. Ainsi, de bons bras sur un bon fauteuil font globalement un mauvais piéton. En outre, beaucoup d'utilisateurs n'ont pas une force normale dans les bras mais souhaitent malgré tout utiliser un fauteuil manuel pour conserver l'exercice salutaire et garder une facilité de transport. De ce fait, le fauteuil manuel est utilisé essentiellement à l'intérieur sur des sols plats de bonne qualité avec un minimum de pente. Seuls les utilisateurs très musclés peuvent envisager des déplacements importants assez difficiles.

Par ailleurs, le corps souffre et il faut l'épargner. Les diverses articulations des membres supérieurs peuvent se détériorer et faire souffrir. Pour garder les bons exercices et éviter les efforts excessifs, une motorisation légère, facile à installer et à transporter permet tout type de déplacements, seul ou accompagné.

Les motorisations légères **BENOIT SYSTEMES** par leur efficacité et leur facilité d'utilisation peuvent être considérées comme un complément indispensable du fauteuil roulant. **Elles sont installées en quelques secondes chaque fois qu'elles sont utiles** et il est ainsi facile de gérer la quantité et le type d'efforts que chacun souhaite effectuer. **Elles suivent l'utilisateur facilement partout, en voiture, dans le train ou dans l'avion.**

Les progrès techniques ont permis de rendre fiables et légères les électroniques et les batteries. Il est logique que tous les utilisateurs de fauteuils roulants bénéficient de ces progrès et se déplacent avec les idées et les moyens de notre époque.

Plus de 20 ans après le démarrage de notre activité la preuve a été faite que les réflexions à l'origine du concept de motorisations légères correspondaient à un vrai besoin, bien réel, quoique non exprimé par les utilisateurs potentiels.

Plusieurs milliers d'utilisateurs sont accompagnés dans la vie quotidienne par nos motorisations et nous exportons actuellement dans une douzaine de pays.

La motivation et l'engagement de toute l'équipe **BENOIT SYSTEMES** sont toujours aussi forts pour satisfaire au mieux notre clientèle.

Robert BENOIT, paraplégique.

Nos distributeurs à l'étranger

Australie

Mobility Care

www.mobilitycare.net.au

Danemark

Sunrise Medical Aps

www.sunrisemedical.dk

Italie

Progettiamo Autonomia

www.my-pa.it

Nouvelle Zélande

Mobility Solutions centre

www.mobilitysolutionscentre.co.nz

Belgique

Mobility By Olivier

www.mobilitybyolivier.be/en

Grande-Bretagne

EMS Southwest Ltd

www.emsmobility.co.uk

Luxembourg

Megamed SARL

www.megamed.lu

Suisse

Degonda Rehab SA

www.turbo-twist.ch

Canada

49 Bespoke Inc

www.49bespoke.com

Irlande

MMS Medical Ltd

www.mmsmedical.ie

Pays-Bas

Mobility & You

www.mobility-you.nl

Emirats Arabes Unis

NMC Trading LLC

www.nmctrading.com

BENOIT SYSTEMES
Motorisez-vous

Découvrez nos autres produits :


ACTI'TAB L'accessoire indispensable pour votre fauteuil roulant et l'accessoire de relaxation « Kitcool »



**CONFORME AUX
NORMES**



CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

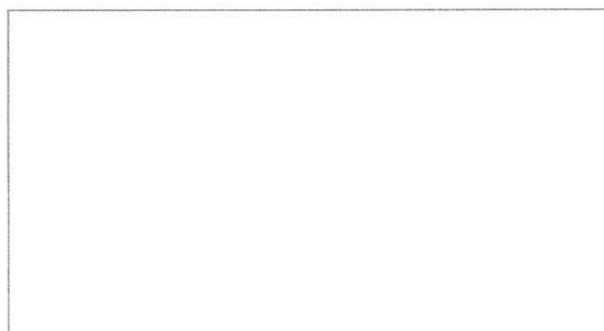

SARL BENOIT SYSTEMES

7 rue du pont 21450 BILLY-LES-CHANCEAUX

Tél. (+33)3.80.96.51.25 Fax : (+33)3.80.96.53.57 – www.benoitsystemes.com

Siret : 80306648900011 Code APE : 3092Z

contact@benoitssystemes.com