
Notice de montage et d'utilisation du fauteuil COCOON 1 ou 2 moteurs ou XXL



Génération 1



Génération 2

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION

Symboles figurant dans ce manuel



Avertissement

Indique une situation dangereuse susceptible de provoquer des blessures graves, voir la mort si elle n'est pas évitée.

1- NOTICE D'UTILISATION

Avant d'effectuer un cycle (monté et surtout descendre) veuillez vérifier que rien (personne, animaux, objets...) ne puissent être coincés sous la mécanique en mouvement.

Conditions de stockage

Le COCOON doit être stocké dans un local sec et tempéré en respectant le sens HAUT/BAS du carton.

Condition d'utilisation

Ne pas faire fonctionner cet appareil sans avoir au préalable :

- été formé à un essai pratique avec le revendeur ou son installateur,
- Lu et compris ce manuel.

Veiller à laisser une distance suffisante (environ 60 cm) derrière le fauteuil pour éviter qu'il ne vienne en contact avec le mur lorsqu'il est en position 'Relax'.

Vérifier systématiquement que rien ne puisse être bloqué ou être dissimulé sous la mécanique avant chaque cycle d'utilisation. La mécanique du fauteuil pourrait provoquer de réelles blessures, soyez très vigilant avec les enfants en bas âge ou les animaux de compagnie.

S'assurer que l'emplacement du fauteuil soit une surface plane et sans déclivité pour valider la bonne stabilité du fauteuil au sol afin que votre fauteuil ne puisse pas glisser.

Ne pas placer le fauteuil à proximité d'une source de chaleur importante.

Brancher le câble alimentation sur un réseau électrique conforme aux normes en vigueur et en correspondance avec la tension du boîtier d'alimentation 230 V.

En cas de risque d'orages il est recommandé de ne pas utiliser le fauteuil.
Le fauteuil releveur ne doit pas se déplacer lors de son utilisation.

Nous vous conseillons de faire un cycle à vide afin de vous familiariser avec le fauteuil.

L'utilisateur doit interdire l'utilisation de ce fauteuil par les enfants. Le repose-jambes n'est pas un siège supplémentaire. Avant de déplacer le fauteuil : débrancher le câble d'alimentation.

En cas de tassement de votre couette. Veuillez svp détacher votre couette et la tapoter afin qu'elle retrouve son gonflant d'origine.

N'utiliser que les pièces et accessoires d'origine distribués par INNOV'SA, permettant de garantir la sécurité et de maintenir la conformité du produit.

Il est interdit de modifier le fauteuil, auquel cas la garantie ne sera plus valable. La mauvaise utilisation du fauteuil annulera également les conditions de garantie. Ne pas exposer le produit en pleine lumière car cela peut entraîner la décoloration partielle des revêtements.

Ne pas démonter les deux roulettes arrière.

Présentation d'usage

L'usage du fauteuil COCOON n'est pas destiné à des personnes désorientées et pour les utilisateurs nécessitant, l'aide et la vigilance d'une tierce personne sont impératives.

Limite de poids

Ce fauteuil releveur ne peut pas être utilisé par des personnes pesant plus de 160 kg (modèle COCOON 1 ou 2 moteurs) et 220 kg (modèle COCOON XXL).

2 – MONTAGE

Sortir le fauteuil de son carton d'emballage.

Commencer par mettre en place le dossier sur la base avant de positionner les accoudoirs.

Incliner la mécanique de votre fauteuil vers l'arrière à l'aide de la télécommande.

Soulever la couette d'assise afin de bien visionner les braquettes.




2 profondeurs d'assise sont possibles : 45 cm ou 55 cm.

Pour la profondeur d'assise de 55 cm, positionner la braquette femelle (A) du dossier (photo 1) face à la braquette mâle (C) de votre base puis emboîter la braquette (C) dans la braquette (A) jusqu'au « CLIC »

Pour la profondeur d'assise de 45 cm, positionner la braquette femelle (B) du dossier (photo 2) face à la braquette mâle (C) de votre base puis emboîter la braquette (C) dans la braquette (B) jusqu'au « CLIC »
Maintenant vous pouvez mettre en place les accoudoirs.

Insérer la tige métallique de votre accoudoir dans l'orifice prévu à cet effet sur l'accotoir de votre fauteuil.
Répéter l'opération pour l'autre côté.

Vous pouvez à tout moment changer la profondeur de votre dossier en tirant la languette de la braquette femelle (photo 2 bis) vers l'extérieur, répéter l'opération de l'autre côté du fauteuil tout en soulevant le dossier. Repositionner ensuite le dossier à la profondeur souhaitée.

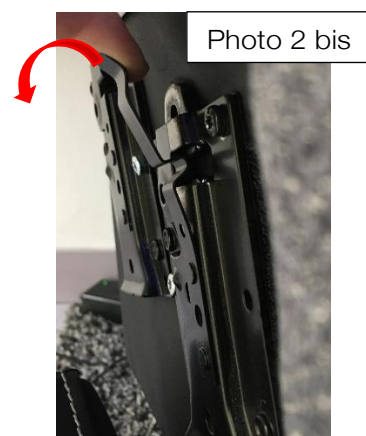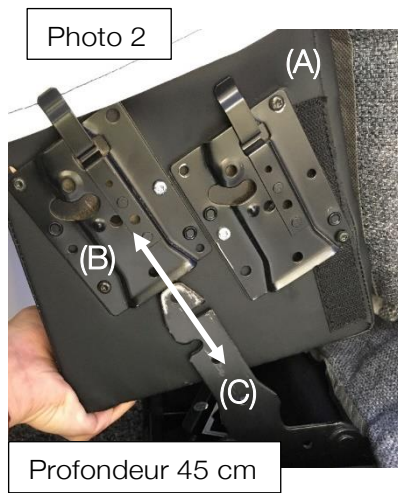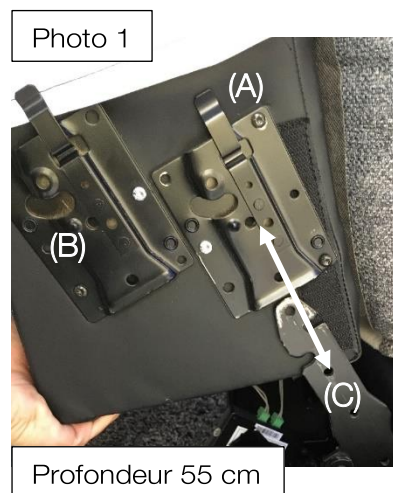

- Brancher le transformateur au câble électrique du vérin.
- Brancher le fil électrique sur le transformateur à l'autre extrémité.
- Vérifier que toutes les connexions électriques soient bien mises en place.
- Brancher le câble d'alimentation sur un réseau électrique conforme aux normes en vigueur et en correspondance avec la tension d'alimentation 220 V.

Si vous souhaitez retirer le dossier, incliner la mécanique de votre fauteuil vers l'arrière, puis tirer légèrement la languette de la braquette vers l'extérieur pour retirer le dossier.

Toute mauvaise manipulation ne rentrera pas dans le cadre de la « prise sous garantie »

Bruit et frottement du fauteuil

Votre fauteuil pourra émettre des bruits lors des changements de position (inclinaison et passage en position releveur) en raison du frottement des tissus.

Ces derniers sont tout à fait normaux. Le confort et la durée de vie de votre fauteuil sont pleinement conservés.

Montage du Porte-revues :

- Ouvrir l'accoudoir (photo 3).
- Insérer le porte-revues dans l'accotoir en faisant attention à ne pas gêner la fermeture de l'accoudoir (photo 3 bis).

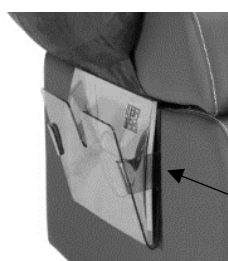


Photo 3 bis

Placer votre porte-revues au centre de l'accotoir afin de ne pas boucher l'encoche située à l'avant



Photo 3

Montage Tablette :

- Mettre le fauteuil COCOON en position releveur (photo 4)
- Insérer le support métallique de la tablette dans l'ouverture prévue à cet effet (photo 5)
- Poser le plateau sur ce support.

Si vous souhaitez changer la tablette de côté, ôter le bouchon noir obstruant l'ouverture et installer votre support de tablette



Photo 4

Ouverture pour installation du support de tablette.

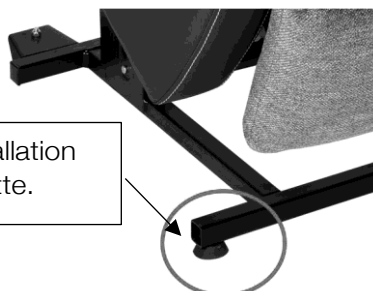


Photo 5

Utilisation de la télécommande

- Télécommande sécurisée et réversible
- Chute impossible grâce à son placement sous le coussin d'accoudoir.

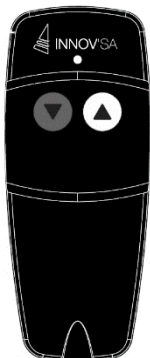


Photo 6

Pour le COCOON 1 moteur et XXL (photo 6)

Télécommande deux boutons

La télécommande deux boutons permet de gérer soi-même son inclinaison.

Bouton vert : inclinaison arrière du fauteuil avec élévation du repose jambes.

Bouton blanc : Retour du fauteuil en position assise avec abaissement du repose-jambes, puis passage en position releveur.

TRES IMPORTANT

Lors du branchement de votre fauteuil sur le secteur, NE PAS APPUYER sur les boutons de la télécommande.

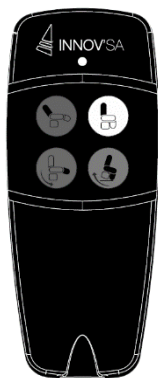


Photo 7

Pour le COCOON 2 moteurs (photo 7)

Télécommande quatre boutons

Bouton vert : Inclinaison arrière du dossier.

Bouton blanc : Remontée du dossier en position droite.

Bouton bleu : Monté du repose-jambes. Retour du fauteuil en position assise.


Bouton jaune : Abaissement du repose-jambes. Passage en position releveur du fauteuil.

Vérifier systématiquement que rien ne puisse être bloqué ou être dissimulé sous la mécanique avant chaque cycle d'utilisation. La mécanique du fauteuil pourrait provoquer de réelles blessures, soyez très vigilant avec les enfants en bas âge ou les animaux de compagnie.

Composition du COCOON

Votre COCOON est composé des éléments ci-dessous






- 1 – Un dossier
- 2 – Une couette de dossier amovible et lavable
- 3 – Une assise
- 4 – Une couette d'assise, repose-jambes amovible et lavable
- 5- Un repose-jambes
- 6- Deux accoudoirs escamotables et amovibles
- 7 – Coussin de confort réducteur d'assise pour le Cocoon génération 2
- 8 - Deux accotoirs
- 9 – Télécommande

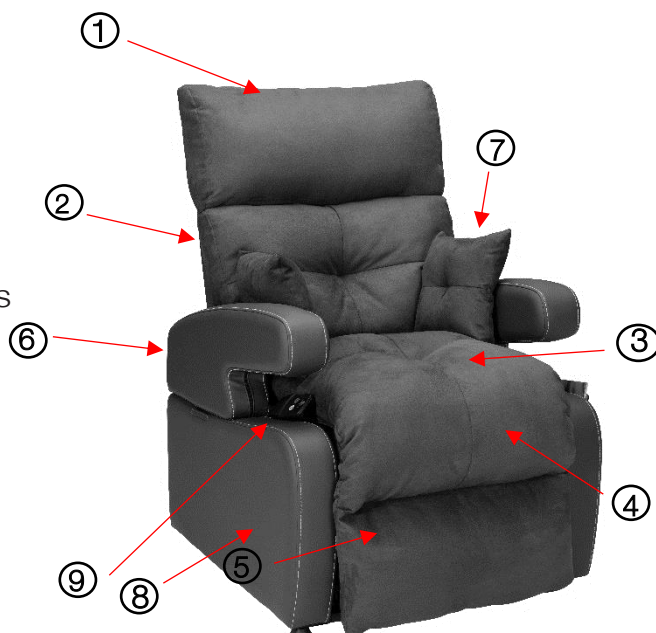

Accessoires :

Il est possible d'avoir les accessoires suivants en option :

- Tablette réversible G/D (photo 8)
- Porte-revues réversible G/D (photo 8 bis)
- Kit batterie (photo 9)
- Kit d'accès soulève-patient (photo 10)
- Kit mobilité (photo 11) composé d'une Bride + 1 canne
- Protection de tête (photo 12)

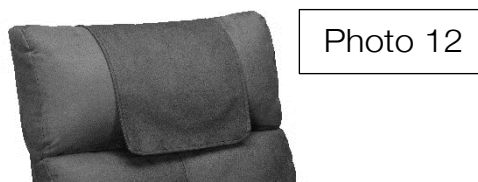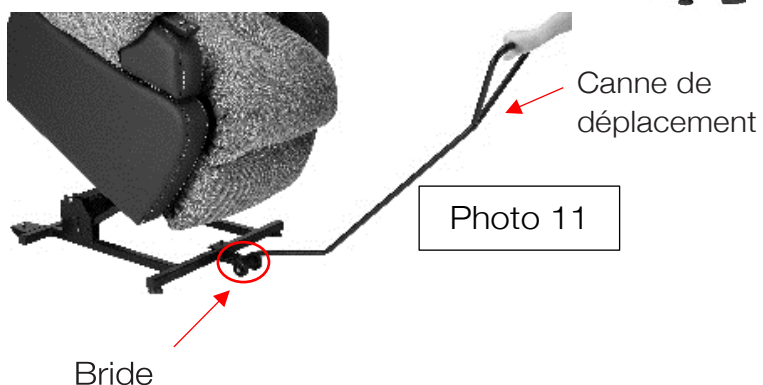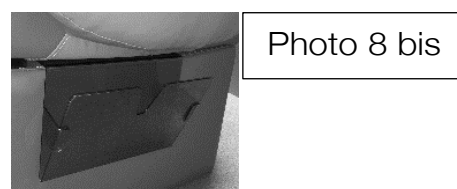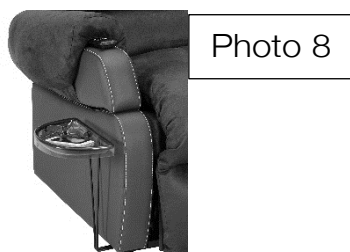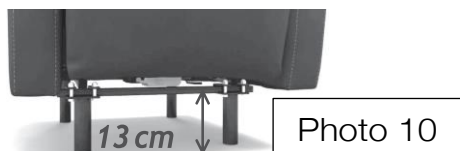

Changement des modules de couettes pour lavage ou remplacement


Couette dossier :

- Enlever le velcro du rabat de la housse situé sur le dos du dossier
- Descendre les 2 zip droit et gauche de la couette

Couette assise / repose-jambes :

Enlever les velcros situés au fond, à droite et à gauche de l'assise.

Tous les modules peuvent être lavés en machine

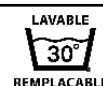

Nous vous conseillons de placer ces couettes lors de leur lavage, dans un filet à linge ou une taie d'oreiller, afin de préserver leur aspect d'origine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids maxi utilisateur	160 kg (1 et 2 moteurs) / 220 kg (modèle XXL)	
Revêtements	Conformes aux Normes Feu 1021-1 et 1021-2 : PVC/PU : Chocolat, Taupe, Réglisse, Pistache, Framboise Rapports d'essais n°367160734 et n° 367160735 Polyester (velours) : Marron & Grège Rapports d'essais n°18.0433.01 et n°18.02686.01 Tissus : Marron Chiné & Gris Chiné Rapport d'essais n° 18.03363.01	
Garniture des couettes	Fibre creuse siliconée	

PROTOCOLE DE NETTOYAGE POUR LES REVETEMENTS DU COCOON

- Tous les détergents solvant et détachants du commerce ne figurant pas dans le NF collectivités, sont à PROSCRIRE IMPERATIVEMENT.
- Les tâches d'encre, de stylos à bille, demandent un nettoyage immédiat afin d'éviter la migration dans le tissu enduit et devenir ensuite définitives.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Code Postal : _____

Ville : _____

Date d'achat : _____

Modèle : _____

Numéro de Série : _____

Afin de valider votre garantie, la date d'achat doit être clairement indiquée.

Cachet du distributeur

Merci de respecter l'environnement, ce produit et ses emballages font l'objet d'un tri sélectif. Déposez votre produit et ses emballages en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets permettra la protection de l'environnement.

En vue d'accroître toujours plus la qualité de nos services nous sommes à l'écoute de vos remarques, quant à la qualité, la fonctionnalité ou l'usage de nos produits développés.

NOTES

Conditions de Garanties

Mécanique et moteur : 5 ans

Fauteuil : 2 ans

La garantie du fauteuil concerne tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 2 ans, à partir du jour de livraison.

La date d'achat doit être inscrite sur le certificat inclus dans ce guide.

De par cette garantie nous vous proposons uniquement la remise en état ou l'échange gratuit des pièces reconnues défectueuses après accord de INNOV'SA. Nous tenons à préciser que cette remise en état ou cet échange ne pourra être effectué avec des pièces neuves, des sous-ensembles neufs ou un échange standard des dites pièces qu'après appréciation de INNOV'SA.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts provoqués par un montage et/ou une réparation inadéquate ou incorrecte et non conforme, par la négligence et l'usure ainsi que par des modifications des composants ou des éléments par l'utilisateur ou par un tiers. Dans ces cas, notre responsabilité de fabricant ne pourra être engagée.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des garnitures, des roues, des tubes (en caoutchouc), etc. les dommages résultant de l'usage de la force ou d'une utilisation non-conforme ne sont pas couverts. Les dommages causés par les utilisateurs pesant plus que le poids maximum autorisé pour chaque modèle de fauteuil sont exclus de la garantie. La garantie n'est valable que si les instructions de maintenance sont scrupuleusement respectées.

Conformités

Les fauteuils INNOV'SA sont fabriqués en complète concordance avec les directives sous mentionnées y compris les dernières modifications et avec la loi nationale qui organise ces directives :

Matériel électrique basse tension 2014/35/UE

Compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE

Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

RoHS Directive 2011/65/EU

Les fauteuils INNOV'SA sont conformes aux Normes électriques suivantes :

- EN 60335-1/A11:2014
- EN 55014-1/A2 :2011
- EN 55014-2/A2 :2008
- EN 61000-3-2 :2014
- EN 61000-3-3 :2013
- EN 62233:2008
- EN 50581 :2012



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier

Donnez une seconde vie à vos meubles. Lorsque vous souhaitez vous en débarrasser, si votre meuble est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'économie sociale et solidaire. Sinon, vous pouvez le déposer à la déchèterie ou le faire reprendre à l'achat d'un meuble neuf. Les meubles collectés dans les bennes Éco-mobilier sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, ...) pour être envoyés en recyclage et servir

Venez découvrir le fauteuil COCOON sur notre site internet www.innov-sa.fr

Scannez-moi





INNOV'SA

7 avenue Bernard Pleds 10110 BAR-SUR-SEINE – FRANCE
Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12
Web: www.innov-sa.com - Email: innovsa@innovsa.com

ATTENTION



- Ne pas laisser les enfants jouer avec le fauteuil
- Toujours laisser le fauteuil et le repose jambes fermés après utilisation
- Garder vos mains et pieds à l'écart du mécanisme
- Seul l'utilisateur doit actionner le fauteuil
- Placer le fauteuil Cocoon 1 moteur au minimum à 60 cm du mur ou à 80 cm pour le modèle 2 moteurs

Notice à conserver