

Bac à shampoing Economique AA1873



Ce bac à shampoing gonflable soutient confortablement la tête et le cou durant le shampoing. Il s'utilise avec l'aide d'un professionnel tandis que le patient est allongé dans son lit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (Pour le professionnel)

1. Gonfler le bac à shampoing à la bouche ou à l'aide d'une pompe (non incluse).
2. Placer le bac sous la tête du patient avec l'ouverture sous le cou.
3. Placer l'extrémité du tuyau de vidange dans un récipient qui recevra l'eau. REMARQUE : S'assurer que le récipient est plus bas que le bac à shampoing de manière à ce que l'eau puisse correctement s'évacuer. Une bouche d'évacuation est présente au dessous du bassin si nécessaire.
4. Appliquer le shampoing sur cheveux mouillés, puis rincer avec de l'eau.
5. Lorsque toute l'eau est évacuée, retirer le bassin de dessous la tête du patient.
6. Rincer et sécher le bac à shampoing après utilisation. Le bac à shampoing doit rester gonflé plusieurs heures après son utilisation, de manière à être sûr qu'il soit complètement sec avant de le replier et de le ranger.



Fabriqué pour :
Valentine International Ltd., Taiwan R.O.C.
Représentant Européen autorisé :
Medical Specialities Limited, BB12QQ, England
Made in Taiwan

Rev. 120606