

## Sonde personnelle

Saint-Cloud  
**Plus**

### Sonde vaginale de stimulation et de biofeedback pour la rééducation périnéale

Vaginal probe for uro-gynecological  
rehabilitation : stimulation and biofeedback.  
Vaginale sonde zur urogynakologischen  
rehabilitation : stimulation und biofeedback.  
Sonda vaginal de reeducacion  
uroginecologica : estimulacion y  
biofeedback.  
Vaginalelektrod for urogynekologisk  
rehabilitering : stimulering och  
biofeedback.  
Sonda vaginal di rieducazione  
uroginetologica stimolazione e  
biofeedback

Stimulation électrodes latérales

Courbure adaptée à l'anatomie

Collerette de repérage

Hygiène optimale

Référence : 114.610 / 6114610  
Code ACL : 7579368 / 3401075793687  
Conception Luc Guillaume,  
Kinésithérapeute,  
Design : Martine Chauveau.

**CefarCompex** 

RECTO  
FRONT

## SONDE "SAINT-CLOUD PLUS" A USAGE STRICTEMENT PERSONNEL

### ENTRETIEN- NETTOYAGE

A nettoyer et/ou désinfecter (produits de désinfection à froid, Anioxyde 1000 de ANIOS par ex.) puis rincer **AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET APRÈS CHAQUE UTILISATION**.  
Ne pas utiliser une solution d'alcool ou de formol concentrée à plus de 20%.  
Débrancher les câbles pour une immersion complète de la sonde.

### APPAREIL PRÉCONISÉ

Doit être utilisée avec des appareils répondant à la directive 93/42 (CEE).  
Aux caractéristiques suivantes :  
- courant alternatif, biphasique, à moyenne nulle  
- intensité max : 150 mA  
- tension max : +/- 80 V

### CONTRE- INDICATIONS

Grossesse, prolapsus total de l'utérus et du vagin, MST, dénévation totale, cancer de la sphère génito-urinaire, port de stimulateur cardiaque (demander l'avis du médecin).

## MODE D'EMPLOI

- 1- Laver avant la première utilisation.
- 2- Introduire la sonde (déconnectée du stimulateur) dans le vagin jusqu'à ce que la collerette vienne en butée sur la vulve (réglage précis de la bonne profondeur de pénétration grâce à la collerette).
- 3- Bien positionner la sonde sur le fond vaginal (patiente couchée sur le dos, les parties métalliques de la sonde doivent être orientées vers le bas).
- 4- Relier les deux câbles connecteurs au câble de sortie de votre appareil de stimulation.
- 5- Mettre en marche le stimulateur, augmenter lentement l'intensité de stimulation.
- 6- A la fin de la séance, arrêter l'appareil et déconnecter la sonde.
- 7- Retirer la sonde du vagin et la nettoyer ou désinfecter.
- 8- La sonde doit être rangée dans son sachet d'origine qu'il faut conserver pendant tout le traitement (le numéro de série de fabrication figure sur le sachet).

### ATTENTION

- Vérifier l'intégrité de la sonde avant chaque utilisation.  
En cas de dommages, ne pas utiliser le produit.
- Effets secondaires rares : irritation et picotements.
- La patiente ne doit être connectée qu'à un seul stimulateur. Ne pas raccorder en même temps à un appareil chirurgical haute fréquence.
- Ne pas dépasser un traitement de plus de 30 minutes par jour.
- Réglage maximum 150 mA (tension de +/- 80 V de crête à 500 Hz) - Ne jamais introduire ou extraire la sonde lorsque le stimulateur est en marche - Pour des raisons d'hygiène et de sécurité : n'utiliser qu'avec les câbles fournis avec la sonde (ne pas utiliser avec une autre sonde).


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière en contact avec la patiente : ABS et inox 316 L biocompatible  
Surface 1 électrode : 7,4 cm<sup>2</sup>  
Long : 12,8 cm  
Diam : +/- 2,4 cm  
Livrée avec 2 câbles souples.

La durée de vie de la sonde est limitée à une série de séances de rééducation.

**CE 0473**

COM-P-PACV3-006

 DJO France  
Centre Européen de Fret  
64990 Mouguerre  
France