

# LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR DISPOSITIFS MÉDICAUX NON INVASIFS

## ANIOS QUICK WIPES

### LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR DISPOSITIFS MÉDICAUX NON INVASIFS

Lingettes désinfectantes à action rapide, prêtes à l'emploi pour les dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.

- Sans rinçage
- Sur base éthanol
- Large spectre d'activité temps de contact court
- Formulation sans colorant
- Odeur agréable



# ANIOS QUICK WIPES

Lingettes désinfectantes pour dispositifs médicaux non invasifs

## DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- Composition : cellulose, viscosse, liant acrylique (non tissé 23gr/m<sup>2</sup>)

Solution d'imprégnation :

- Limpide incolore
- Parfum : Thé citron
- Densité à +20°C : environ 0,9
- pH à 20°C : 5,5

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

EFFICACITÉ	TEMPS DE CONTACT
EN 16615* (bactéricide et levuricide)	30 sec
Solution d'imprégnation:	
EN 13727* (bactéricide)	30 sec
EN 13624* (levuricide)	30 sec
EN 13624* (fongicide)	5 min
EN 14348* (tuberculocide)	30 sec
EN 14348* (mycobactéricide)	5 min
EN 14476* (actif sur les virus enveloppés) Vaccinia	30 sec
EN 14476* (virucide à spectre limité) (Adenovirus / Norovirus (MNV))	5 min (30 sec/5 min)

\* Conditions de propreté

## INFORMATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
ANIOS Quick Wipes (dimensions de la lingette : 130 x 190 mm)	12 boîtes de 120 lingettes	2333.421



 **LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribué par :  
**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

## INDICATIONS

Lingettes désinfectantes à action rapide, prêtes à l'emploi pour les dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables préalablement nettoyés et résistants à l'alcool.

## MODE D'EMPLOI

Lingettes prêtes à l'emploi. S'utilise sur les dispositifs médicaux préalablement nettoyés. Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.

Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses. Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d'hygiène en place. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.

Ne pas réutiliser la lingette, la désinfection ne pourrait plus être garantie.

Remarques : Vérifier avant application la compatibilité des dispositifs médicaux traités avec l'alcool.

Durée limite d'utilisation après ouverture basée sur EN 16615 : 3 mois.

## COMPOSITION

Solution d'imprégnation: Ethanol (N°CAS 64-17-5 550 mg/g), Propionate de N, N-didécyloxy-N-méthylpoly(oxyéthyl) ammonium (N°CAS 94667-33-1: 1.1 mg/g), parfum.

## CERTIFICATS

Dispositif médical. L'activité antimicrobienne complète de ANIOS QUICK WIPES est incluse dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage : entre +5°C et +25°C.

## POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



[www.anios.com](http://www.anios.com)